



细胞保存液

产品货号	产品名称	包装
DW0307	细胞保存液	100ml

产品介绍:

用于保存、运输取自人体的细胞。细胞保存液 I 型和细胞保存液 III 型主要用于宫颈癌筛查，对取得的宫颈细胞进行固定和保存，细胞保存液 II 型主要用于人体其他细胞学检查时，对取得的细胞样本进行固定和保存。

包装规格:

名称	型号	规格	
细胞保存液	I 型	15ml/瓶/人份	10ml/瓶/人份
	II 型	15ml/瓶/人份	10ml/瓶/人份
	III 型	15ml/瓶/人份	10ml/瓶/人份

主要组成成分:

- 1) 细胞保存液-I 型:无水乙醇、氯化钠和去离子水。
- 2) 细胞保存液-II 型:异丙醇、无水乙醇、氯化钠和去离子水。
- 3) 细胞保存液-III 型:无水乙醇、去离子水和防腐剂。

保存说明:

4°C-35°C 保存，一年有效；试剂开瓶后，有效期为 40 天。

检验原理:

细胞保存液中的乙醇具有对人体组织细胞固定的作用，能保存细胞完整，无细胞溶解现象。

适用仪器:

可与液基薄层细胞制片机 HEER-II 配套使用。

样本要求:

适用于新鲜的人体脱落细胞的样本。

染色方法:

- 1) 宫颈细胞:用一次性宫颈刷采集宫颈细胞标本:大拇指和食指捏住刷柄,将宫颈刷尖伸入宫颈口内朝一个方向旋转 3-5 周, 抽出宫颈刷, 卸下刷头放入装有 15ml 细胞保存液 I 的小瓶中(如果病人宫颈上的粘液或分泌物较多时, 应先用棉球将粘液或分泌物拉出后再采样)。在瓶签上注明采样人信息。

2) 痰细胞:病人先清除口内唾液、咽喉分泌物和食物残渣,再从肺部深处用力咳出痰液至装有细胞保存液一Ⅱ的小瓶内,旋紧瓶盖,颠倒混匀。在瓶签上注明采样人信息。如条件允许,请使用雾化生理盐水吸入促进排痰。

注意事项:

为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品文章中的写法:

英文: Dowobio (Shanghai, China)

中文: 上海多沃生物科技有限公司 Dowobio, 上海

